

DILATAN

ANÁLNÍ DILATÁTORY

KÓD A.1001, A.1002, A.1003



NÁVOD K POUŽITÍ

1. Zahřejte dilatátor pod teplou tekoucí vodou (ne přes 50 °C) v případě hypertonu nebo bolestivého spazmu. Vychladte dilatátor v lednici (ne pod 0 °C) v případě análního krvácení.
2. Potřete dilatátor krémem nebo lubrikační masťou.
3. Zasouvejte dilatátor velmi pomalu do análního otvoru až po jeho bazi, vsedě na bidetu nebo vleže na posteli, je jedno, zda před nebo po defekaci.
4. Ponechejte dilatátor takto 1–3 minuty v souladu s lékařským doporučením.
5. Vytáhněte jej pomalu ven.

UPOZORNĚNÍ. V souladu s lékařským doporučením opakujte dilataci jednou až dvakrát denně, minimálně po dobu jednoho měsíce. Následující fáze, rovněž pod dohledem specialisty, spočívá v zavedení dilatátoru s větším průměrem po stejnou dobu a stejně často.

6. Umyjte dilatátor teplou vodou a neutrálním mýdlem a v případě nutnosti na několik hodin ponořte dilatátor do dezinfekčního roztoku.
7. Usušte dilatátor a uložte zpět do krabičky.

UPOZORNĚNÍ. V případě, že výrobek není v perfektním stavu, nebo je obal poničený, prosíme o zaslání výrobcí, číslo šarže a den výroby, natištěné na obalu.

DOPORUČUJEME PŘÍSNÉ POUŽÍVÁNÍ PRO JEDNOHO PACIENTA.

Dilatan krém A.3050

Krém obsahuje heřmánek, třezalku a měsíček lékařský.

