

Anální tampóny jsou zdravotnické prostředky/pomůcky, vyrobené z polyvinylalkohol pěny (PVA). Pěna – materiál je toxikologicky, dermatologicky i imunologicky inaktivní (certifikáty na vyžádání). V nabídce jsou různé tvary i velikosti análních tampónů vzhledem k individuálním potřebám každého pacienta.



Kuželovitý

Indikován při snížené funkci vnitřního svěrače a zachovalé senzitivě. Střední rozšířená část dobře utěsní anální kanál a projmutí minimalizuje podráždění.

Kat. č:	délka	průměr
1636	83 mm	30/36 mm
1628	67 mm	26/32 mm



Cylindrický

Standardní tampón, který je indikován v případech, kdy je inkontinence způsobena nedostatečným uzávěrovým mechanismem, při aspoň minimální zbytkové funkci zevního svěrače.

Kat. č:	délka	průměr	Kat. č:	délka	průměr
2103	30 mm	10 mm	2241	60 mm	24 mm
2123	30 mm	12 mm	2260	67 mm	26 mm
2153	37 mm	15 mm	2261	60 mm	26 mm
2180	67 mm	18 mm	2262	51 mm	26 mm
2181	60 mm	18 mm	2280	67 mm	28 mm
2182	47 mm	18 mm	2300	67 mm	30 mm
2183	37 mm	18 mm	2301	60 mm	38 mm
2200	67 mm	20 mm	2330	67 mm	33 mm
2201	60 mm	20 mm	2380	67 mm	38 mm
2220	67 mm	22 mm	2400	67 mm	40 mm
2221	60 mm	22 mm	2405	102 mm	40 mm
2222	51 mm	22 mm	2450	67 mm	45 mm
2240	67 mm	24 mm			



Spirální

Indikován u inkontinentních nemocných trpícím zvýšenou flatulencí. Spirálně vroubkovaný povrch umožňuje, v nezbytně nutné míře, odchod plynů, který by jinak svým přetlakem mohl způsobit vytlačení tampónu, a tím ztrátu jeho funkce a střevní debakl.

Kat. č:	délka	průměr	Kat. č:	délka	průměr
0220	64 mm	22 mm	0263	44 mm	26 mm
0260	64 mm	26 mm	0330	64 mm	33 mm



Konkávní

Indikován u nemocných s normálním anatomickým uspořádáním análního kanálu nebo v případě jeho tenózy (zúžení). Zúžení ve střední části tampónu snižuje dráždění a tím zlepšuje jeho toleranci.

Kat. č:	délka	průměr	Kat. č:	délka	průměr
1160	67 mm	16 mm	1202	51 mm	20 mm
1161	60 mm	16 mm	1250	67 mm	25 mm
1162	51 mm	16 mm	1251	60 mm	25 mm
1164	40 mm	16 mm	1280	67 mm	28 mm
1181	60 mm	18 mm	1281	60 mm	28 mm
1200	67 mm	20 mm	1300	67 mm	30 mm
1201	60 mm	20 mm	1350	67 mm	35 mm



Konvexní

Indikován u nemocných se zachovalou citlivostí ve vstupní části do análního kanálu (senzitivní zóně), ale omezenou funkcí svěračového aparátu. Zúžení minimalizuje kontakt se senzitivní zónou, a tak snižuje dráždění, na které vnitřní svěrač odpovídá svojí relaxací.

Kat. č:	délka	průměr
3020	51 mm	24mm
3030	60 mm	33 mm



Kulový

Balónovitý – indikován u nemocných bez jakékoli reziduální funkce svěračového aparátu. Kulovité respektive balónovité zakončení funguje jako zátka a tím zajišťuje zadržení stolice v rektální ampule.

Kat. č:	délka	průměr	Kat. č:	délka	průměr
3103	40 mm	10 mm	3200	60 mm	20 mm
3123	49 mm	12 mm	3220	60 mm	22 mm
3150	60 mm	15 mm	3280	40 mm	28 mm
3180	60 mm	18 mm	3300	67 mm	30 mm
3182	40 mm	18 mm			



Aplikátor na anální tampóny malý

Katalogové číslo: 7100

Aplikátor na anální tampóny velký

Katalogové číslo: 7200



Anální krytka kulatá

Katalogové číslo: 7400

aar & zdraví ANÁLNÍ TAMPÓNY

NÁVOD K POUŽITÍ. Prosíme, přečtěte si také pečlivě doporučení na zadní straně. Zavedení (aplikaci) tampónu provádějte přesně podle tohoto ilustrovaného návodu. Tampóny jsou určeny pro jedno použití. Aplikátor – zavaděč je určen k opakovanému použití.



1

Před aplikací si umyjte ruce mýdlem.



2

Opláchněte či omyjte si konečník.



3

Vyjměte tampón z ochranného obalu.



4

Vytáhněte provázek pro vytažení.



5

Krátce namočte tampón ve vlažné vodě.



6

Vymačkejte přebytečnou vodu, ale **neždímejte!**



7

Tampón našroubujte na trn zavaděče. Na horní konec tampónu je vhodné nanést vazelínu pro snadnější zavedení.



8

Uchopením za aplikátor zaveďte tampón dostatečně hluboko do konečníku.



9

Aplikátor šroubovitým pohybem vytáhněte. Při vytahování přidržte tampón sevřením svěračů a hýždí.



10

Vytahovací vlákno přilepte náplastí k hýždí.



11

Po aplikaci tampónu si opět umyjte ruce.



12

Maximálně po 8 hodinách tampón, pomocí vlákna, vytáhněte. **Použitý tampón NIKDY nevhazujte do toalety.**

DOPORUČENÍ:


- před použitím tampónu, pokud je to možné, se vyprázdněte
- pravidelným nácvikem se pokuste navyknout střevu na stejný čas vyprazdňování (o způsobu nácviku se poraďte se svým lékařem)
- zpočátku používejte tampóny menší velikosti
- hrot aplikátoru, pro jeho snazší uvolnění, potřete vazelínou
- zpočátku, po zavedení tampónu, můžete mít pocit nucení na stolicí – stažením konečníku nucení potlačte, nebo vyčkejte, až nucení samo vymizí (tento reflex po určité době, cca 5–6 týdnů vymizí)
- zavedený tampón ponechte v konečníku maximálně 6–8 hodin
- tampón odstraňte pozvolným tahem na vytahovací vlákno
- dojde-li při vytahování tampónu k přetržení vlákna a Vy nebudete schopni se jej sami vytáhnout, prosíme, navštivte lékaře
- další tampóny získáte u svého ošetřujícího lékaře nebo u nás

1




Před aplikací si umyjte ruce mýdlem.

2

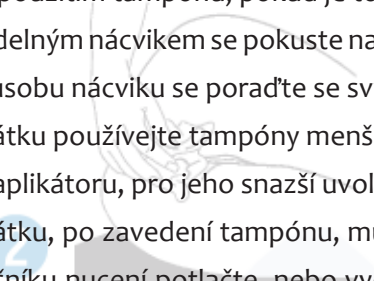

Puťte hrot aplikátoru či omijte si konečník.

3

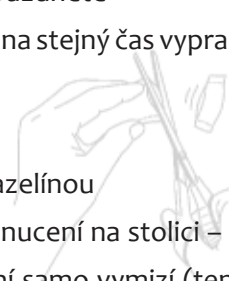


Vyjměte tampón z ochranného obalu.

4



Vytáhněte provázek pro vytažení.

5

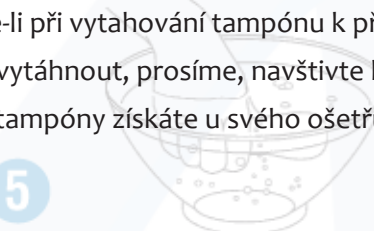

DISTRIBUCE močte tampón ve vlažné vodě.

AAR s.r.o., ZDRAVÍ spol. s r.o.


Čiklova 7, 128 00 Praha 2

Tel./fax/záznamník: +420 224 937 829

E-mail pro objednávky: aar@aarskrickova.cz

www.aarskrickova.cz

6

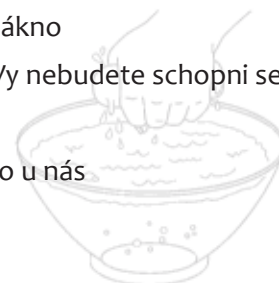


Vymačkejte přebytečnou vodu, ale **neždímejte!**

7



Tampón našroubujte na trn zavaděče. Na horní konec tampónu je vhodné nanést vazelínu pro snadnější zavedení.

8

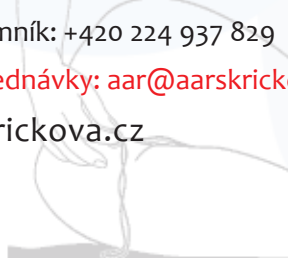

Uchopením za aplikátor zaveďte tampón dostatečně hluboko do konečníku.

9



Aplikátor šroubovitým pohybem vytáhněte. Při vytahování přidržeť tampón sevřením svěračů a hýždí.

10



Vytahovací vlákno přilepte náplastí k hýždí.

11



Po aplikaci tampónu si opět umyjte ruce.



A.A.R. Ing. Alena Skříčková, s.r.o.

ZDRAVÍ spol. s r.o.

www.aarskrickova.cz

Čiklova 7, 128 00 Praha 2

+420 602 506 806

aar@aarskrickova.cz

